


1. Indique al paciente que **aguarde la respiración durante 4-5 segundos** y luego exhale en la bolsa de muestra de aliento de **REFERENCIA azul**.

2. Presione la tapa hasta que se encaje


3. Prepare la bebida de prueba **disolviendo el polvo cítrico y la tableta de urea 13C enriquecida** en 150 a 200 ml de agua del grifo en la taza provista

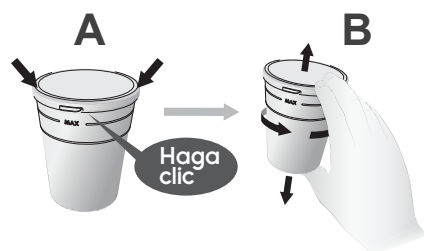

4. **A.** Cierra la copa **firmermente** con ambas manos
B. Mezclar hasta que se **disuelva** por completo

5. Abra la tapa e indique al paciente que **beba** toda la solución con el popote **en 2 minutos**

6. Espere **15 minutos**

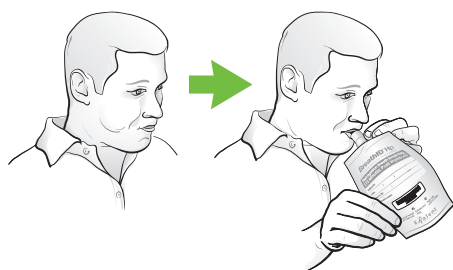

7. Indique al paciente que **aguarde la respiración durante 4-5 segundos**, y luego **exhale** en la bolsa de muestra de aliento **POS-INGESTIÓN gris**

8. Presione la tapa hasta que se encaje

9. Coloque **ambas** bolsas con muestras de aliento en la bolsa de transporte suministrada

Para obtener información detallada relativa al procedimiento paso a paso, consulte el inserto del IDkit Hp® Two

breathID®



Escanear para ver el video

meridian BIOSCIENCE®