


INSTRUCCIONES PARA EL PROVEEDOR/CONSULTORIO/CLÍNICA:

Suspensión de la Muestra Recolectada por el Paciente en el vial ThinPrep PreservCyt.

La muestra auto-recolectada debe colocarse en el medio de vial ThinPrep PreservCyt después de haber sido recolectada.

- Lea todas las instrucciones antes de comenzar la suspensión de la muestra.
- Para la recolección de la muestra, siga las instrucciones de recolección del paciente para los hisopos Copan FLOQ (552C.RM).
- Una vez recolectada la muestra, continúe con las siguientes instrucciones para conservarla.


Glosario

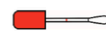

FLOQSwab/Swab: Dispositivo de auto-recolección utilizado para recoger muestras.




Tubo: Un recipiente protector en el que viene el dispositivo de auto-recolección y que puede usarse para almacenar temporalmente el dispositivo de recolección después de que se haya tomado la muestra.

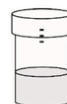


Frasco PreservCyt: Un recipiente que contiene 20 ml de solución transparente. La muestra que recoja deberá transferirse a este recipiente, el cual se enviará al laboratorio para su procesamiento.

Medio: Cómo se llama el líquido que viene en el vial.


Manipule la muestra recogida con cuidado.

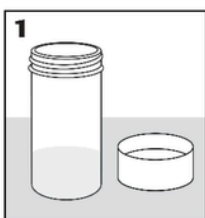


1. Retire con cuidado la tapa del vial que contiene el medio y colóquelo sobre una superficie plana y estable.

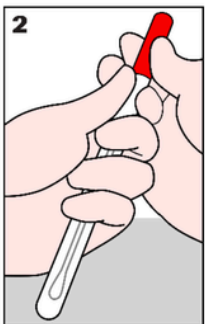


2. Retire lentamente la tapa del FLOQSwab para extraer el hisopo del tubo. Minimice el contacto con las paredes internas del tubo al extraer el FLOQSwab.

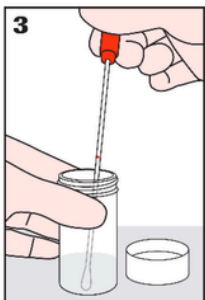


3. Sujete el vial con una mano y, con la otra, introduzca la punta del FLOQSwab en el vial hasta que esté completamente sumergida en el medio y toque el fondo del vial PreservCyt.

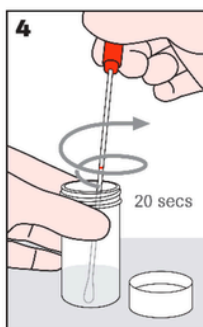

4. Sujetando el vial, gire el hisopo FLOQSwab a lo largo de la pared interior del vial durante 20 segundos, asegurándose de que el hisopo permanezca sumergido en el medio. Tenga cuidado de no salpicar.

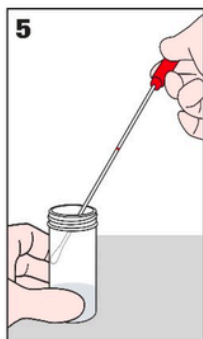

5. Deslice con cuidado el hisopo FLOQSwab a lo largo de la pared interior del vial hasta que la punta ya no esté sumergida en el medio. Mantenga la punta contra la pared interior del vial para drenar el líquido del hisopo. Coloque el hisopo FLOQSwab en el tubo y deséchelo.

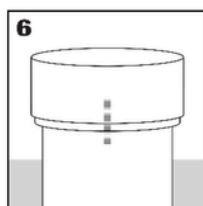

6. Vuelva a tapar el vial y apriételo hasta que las líneas de la tapa y del vial coincidan o se superpongan ligeramente para evitar fugas. Guárdelo en posición vertical. La muestra ya se puede enviar al laboratorio para la prueba del VPH.