

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA POR CUENTA PROPIA:

Muestras Vaginales Autotomadas para la Detección del VPH

Preguntas Frecuentes

Actualmente se aceptan muestras vaginales autotomadas para determinadas pruebas de VPH.

Q ¿Qué prueba de laboratorio de Interpath acepta muestras autotomadas?

- A** La única prueba aprobada para muestras autotomadas es (HPV SELF-COLLECT #5290).
- **Virus del papiloma humano (VPH), alto riesgo con genotipos 16, 18 y otros.**
- Actualmente, ninguna otra prueba de detección del VPH acepta muestras autotomadas.

Q ¿Qué artículo de suministro de laboratorio de Interpath se debe utilizar?

A Utilice el Kit de Auto-recolección Vaginal

El kit incluye:

- Hisopo de recolección FLOQSwab
- Vial ThinPrep
- Las instrucciones para la recogida de muestras están disponibles en nuestra página web: www.InterpathLab.com/hpv-collection-instructions/

El kit se puede pedir:

- Disponible en línea a través de eSupply: Artículo #109455 esupply.interpathlab.com

#109455



Q ¿Dónde y cómo deben recolectarse las muestras?

- A**
- La toma de muestras debe realizarse en un entorno clínico (no en casa).
 - Un profesional sanitario debe colocar inmediatamente el hisopo en el medio ThinPrep después de la toma de la muestra.

Q ¿Se pueden utilizar muestras autotomadas para la citología de confirmación (prueba de Papanicolaou)?

- A** No. Las muestras vaginales autotomadas no pueden ser enviadas a citología. Las pruebas citológicas requieren células cervicales, que no se obtienen mediante la auto-recolección vaginal.